

Σημείωση


Το κρεβάτι διαθέτει τέσσερις τροχούς με φρένο. Η εμπλοκή και απεμπλοκή των φρένων επιτυγχάνεται πατώντας με την μύτη του παπουτσιού το μαύρο πλαστικό τμήμα που βρίσκεται επάνω τμήμα τους.



Τέταρτο στάδιο

Τοποθετούμε τον αναρτήρα (εφόσον υπάρχει) επάνω δεξιά ή αριστερά, όπου προτιμάμε στο σωμιέ στο προσκέφαλο στις κατάλληλες υποδοχές.

Τοποθετούμε το στρώμα μας επάνω στο σωμιέ ώστε τα ανάλογα σπασίματα να συμβαδίζουν με τα σπασίματα του κρεβατιού.

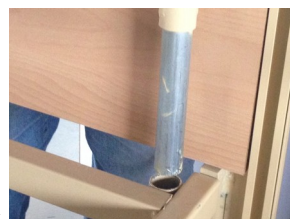

Ο συγκεκριμένος τύπος κρεβατιού είναι **ελληνικής κατασκευής** και διαθέτει σήμα συμμόρφωσης **CE** σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ημερομηνία: / /

Εργοστάσιο κατασκευής

ΟΡΘΟΚΙΝΗΣΗ

Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ


ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΑΣΙΟΥ 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 12131

ΤΗΛ. 210 55.50.615 FAX. 210 34.62.081

ΟΡΘΟΚΙΝΗΣΗ

από το 1904.

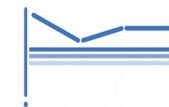

Η Νο 1 Ελληνική εταιρεία

κατασκευής νοσοκομειακού εξοπλισμού. **Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ**

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Λειτουργίας κρεβατιών

Trento 1, 2 & bariatric



Περιεχόμενα συσκευασίας:

- α) Δύο μετώπες κρεβατιού συναρμολογημένες.
- β) Ένα σωμιέ κρεβατιού συναρμολογημένο.
- γ) Δύο ζευγάρια ξύλινα πλαϊνά κρεβατιού.
- δ) Εξαρτήματα για την συναρμολόγηση πλαϊνών (4).
- ε) 8 σφικτήρες
(ή 12 στην περίπτωση που το σωμιέ είναι διαιρούμενο)
- στ) Ένα εγχειρίδιο.

Σημείωση:

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα περιτυλίγματα προσεκτικά.


Πρώτο στάδιο συναρμολόγησης.

Τοποθέτηση μετωπών στο σωμιέ.

Κρατάμε την μια μετώπη του κρεβατιού όρθια και με την βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου βάζουμε τις δυο σωλήνες που εξέχουν δεξιά και αριστερά της μετώπης μέσα στις υποδοχές του σωμιέ.

Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με την άλλη μετώπη.

Τέλος τοποθετούμε κ βιδώνουμε τους σφικτήρες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία πάνω στο σωμιέ για να το σταθεροποιήσουμε στις μετώπες.

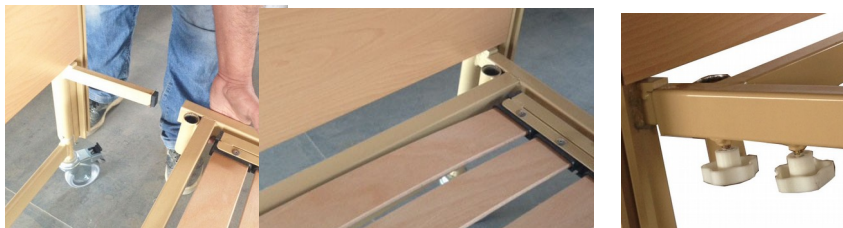

Δεύτερο στάδιο

Τοποθέτηση πλαϊνών

Για να συναρμολογήσουμε τα τέσσερα σετ εξαρτημάτων για τα πλαϊνά , τοποθετούμε το καθένα με τη σειρά στις υποδοχές-οδηγούς αλουμινίου που έχουν οι μετώπες και τα ανεβάζουμε έως επάνω ώστε να κουμπώσει ο μαύρος πύρος που βρίσκεται στο επάνω μέρος της μετώπης.

Σημείωση:

Όταν ο πύρος έχει κουμπώσει τα εξαρτήματα δεν κατεβαίνουν.

Αφού τοποθετήσουμε και τα τέσσερα σετ, μπορούμε να κουμπώσουμε και τα τέσσερα ξύλινα πλαϊνά τα οποία διαθέτουν υποδοχές που μπαίνουν στα αξονάκια (σιδεράκια) των σετ εξαρτημάτων που έχουμε βάλει στις μετώπες του κρεβατιού.



Σημαντικό

1. Οι πύροι στερέωσης δεν πρέπει να εξέχουν καθόλου από τις μετώπες
2. Σφίγγουμε πολύ καλά τον σφικτήρα που “κλειδώνει” τις μετώπες του κρεβατιού. Ο σφικτήρας αυτός βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά των μετωπών.

Τρίτο Στάδιο Συναρμολόγησης

Τροφοδοτικό

Ενώνουμε τα καλώδια από τα μοτέρ που βρίσκονται ήδη πάνω στις μετώπες του κρεβατιού με το τροφοδοτικό που βρίσκεται κάτω από το σωμιέ.

Ενώνουμε τα αρσενικά βύσματα (από τα μοτέρ πλάτης (1), ποδιών (2) ανύψωσης σωμιέ (3,4) και χειριστηρίου (5)) με τα ανάλογα θηλυκά που βρίσκονται στο τροφοδοτικό του κρεβατιού.

Συνδέουμε το φισ του ρεύματος με την πρίζα και δοκιμάζουμε όλες τις λειτουργίες του κρεβατιού από το χειριστήριο.

Εάν κάποια λειτουργία δεν γίνεται κανονικά ή καθόλου ελέγχουμε εάν όλα τα βύσματα είναι στην σωστή θέση και κάνουν καλή επαφή. Έπειτα ελέγχουμε εάν το φισ του ρεύματος δίνει ρεύμα.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα τότε πρέπει να μιλήσετε με κάποιο τεχνικό της εταιρίας μας.

